

## Mode Opérateur - La Boucle magnétique

- La boucle magnétique est utilisée pour venir en aide aux personnes malentendantes appareillées.
- Elle doit toujours être à proximité du comptoir adapté, et être indiquée au moyen d'un autocollant à l'entrée de l'Office de Tourisme.
- S'assurer que la personne malentendante possède un appareil auditif de type « T ».

### Si c'est le cas

- La personne malentendante met son appareil auditif sur la position « T ».
- Allumer la boucle magnétique avec le bouton sur le dessus.

**Si la lumière est verte**, il n'y a pas besoin de le charger.

**Si la lumière est rouge**, il convient de le brancher pour le charger.

- Parler distinctement et lentement dans le micro prévu à cet effet.
- Vérifier que la personne entend et comprend correctement. Sinon, utiliser le bouton de volume situé derrière l'appareil, pour le réglage.

### Si la personne n'a pas d'appareil adapté type « T »

- Proposer à la personne de mettre le casque sur les oreilles.
- Parler distinctement dans le micro prévu à cet effet.
- Vérifier que la personne entend et comprend.